

# Principelle Celan

Dispositivo médico

## Celan “Cuidados da Pele”

Celan é um creme multifuncional que pode ser utilizado em todos os tipos de pele. A associação de mel de grau medicinal, com fortes propriedades antioxidantes e extratos de plantas, permite o alívio da pele irritada. Celan pode ser utilizado em queixas de prurido, irritação ou dor, que ocorrem no rebordo da ferida, na zona que limita o penso ou em qualquer outro local. A causa destas ocorrências é muitas vezes desconhecida. Este produto pode ser utilizado no rosto. Evite o contato com os olhos. Celan é comercializado numa embalagem que permite uma fácil aplicação e que o protege de contaminação ao impedir o contato com o ar.

### Composição

Componentes ativos

- Mel de trigo mourisco escuro, de grau medicinal
- Propionil acetovanilona: anti-inflamatório não esteróide de origem vegetal, modificado para penetrar na pele
- Óleo de cravo da Índia: analgésico e antisséptico natural, devido ao seu principal componente, o eugenol.
- Extrato de *Cardiospermum halicacabum* (planta de balãozinho, espécie da família Sapindaceae): tem propriedades anti-inflamatórias e é indicado para aliviar problemas cutâneos como: eczema, vermelhidão e pele descamada.
- Paenol: composto ativo extraído da casca da *Paeonia Suffruticosa* utilizado para diminuir a dor e retardar a agregação plaquetária. Tem propriedades anti-inflamatórias e retarda a peroxidação lipídica.

**Outros ingredientes:** cera lanette, ácido sorbico, sorbato de potássio, malaleuca, água purificada.

### Modo de utilização

Limpar cuidadosamente a zona com água ou uma loção suave e deixar secar. Aplicar uma fina camada de Celan evitando friccionar. As zonas irritadas ou os bordos das feridas devem ser tratados várias vezes ao dia ou pelo menos a cada muda de penso.

### Precauções e observações

Não usar em feridas abertas ou em queimaduras

Armazenar à temperatura ambiente ( 15-25° C)

Celan não contém parabenos, perfume ou agentes corantes

Fabricante :

**Principelle B.V.**

The Netherlands

[www.principelle.com](http://www.principelle.com)

[info@principelle.nl](mailto:info@principelle.nl)

Comercializado por :

**Principelle Portugal, Lda.**

Rua da Barra, 20, bloco B, r/c dto. – Paço de Arcos

Doc. N° PCL01/13PP



Principelle BV  
[info@principelle.nl](mailto:info@principelle.nl)  
[www.principelle.com](http://www.principelle.com)